



Prélèvement et conservation des échantillons

Échantillon de prélèvement nasopharyngé

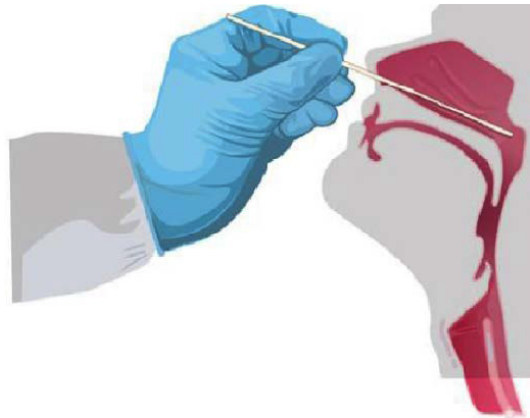

1. Inclinez votre tête vers l'arrière 70°
2. Insérez l'écouvillon stérile dans les narines parallèlement au palais jusqu'à ce que vous sentiez une résistance
3. Roulez l'écouvillon stérile plusieurs fois dans le nasopharynx et laissez l'écouvillon en place pendant quelques secondes pour absorber les sécrétions
4. Retirez soigneusement l'écouvillon stérile de la narine
5. L'échantillon doit être testé dès que possible après le prélèvement

Échantillon d'écouvillon oropharyngien

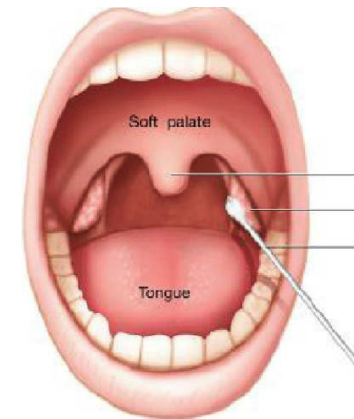


1. Inclinez légèrement la tête en arrière, ouvrez grand la bouche pour exposer les amygdales et derrière la gorge
2. Utilisez l'abaisse-langue pour maintenir la langue loin de l'arrière de la gorge
3. Repérez les zones de rougeur et les taches blanches sur les amygdales
4. Frottez l'écouvillon sur la zone, d'avant en arrière, sans toucher la langue ou le palais
5. L'échantillon doit être testé dès que possible après le prélèvement

Procédure de test

1

Ajouter 8 gouttes (environ 250 µl) de la solution d'extraction de l'échantillon dans le tube à échantillon et recueillir ensuite les spécimens (comme ci-dessus)

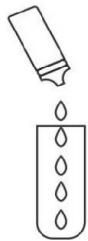

2

Insérez l'écouvillon dans le tampon d'extraction et pressez l'écouvillon 20 fois en comprimant les parois du tube contre l'écouvillon




3

Laissez l'écouvillon reposer pendant 30 secondes ou plus, puis jetez le manche de l'écouvillon.




4

Placez l'embout du compte-gouttes propre sur le tube de prélèvement

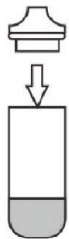


5

Inverser le tube d'échantillonnage et ajouter 3 gouttes de l'échantillon dans le trou d'échantillonnage (S)

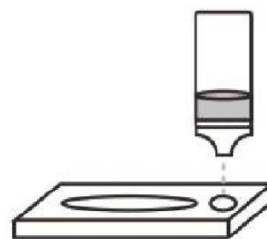

6

Régler la minuterie sur 10 minutes et lire le résultat

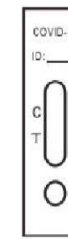

Interprétation des résultats



Positif



Négatif



Invalide